



Hydragel

Eelpesuaine



Toode, mis on mõeldud selliste instrumentide eeltöötlemiseks, mida ei puhastata vahetult pärast kasutamist.

Rakendused

Pihustage saastunud instrumentidele, et ennetada mikroobide vohamist ja mustuse kuivamist instrumentide pinnal.

Meditsiiniseade, professionaalseks kasutamiseks.

Toote omadused

Geeljas pihustusaine moodustab instrumendi pinnale mikroobe tõrjuva kihi. Toime kestab viis päeva. Hydragel on vesilahustuv ja seda on instrumentide pindadelt kerge maha loputada. Sobib enamlevinud materjalidega, ei sobi vase ja messinguga.

Kasutusjuhend

Pihustage Hydrageli kaitsegeeli transpordikastis olevatele instrumentidele. Tehke instrumendid ettevaatlikult geeliga märjaks. Järgige instrumentide hoidmiseks ja transportimiseks mõeldud ohutusjuhiseid. Peske instrumente tavapärasel moel.

Märkus

Vältige kokkupuudet kemikaalidega, mis võivad korrodeerida või kahjustada metalle. Need võivad geeli all säilida aktiivses olekus. Pritsmed võivad põrandapinna libedaks muuta. Puhastage veega.

Koostis

Toimeaine	
Rasvhapete alkanoolamiinsoolad	5 - 15%
Mitteioonsed pindaktiivsed ained	< 5%
2-fenoksüetanool	
Korroosiooni inhibiitor	
Vahuvastane aine	

Toote pH

9.0 Nõrgalt leeliseline

Säilitamine

Hoida temperatuuril alla 28 °C.
Kõlblikusaeg kolm aastat alates tootmiskuupäevast.

Tootjariik

SOOME

Kasutamise ja keskkonna ohutus

Hydrageli eeltöötlusgeeliga seotud tõsistest vahejuhtumitest tuleb teatada aadressil asiakaspalvelu@kiilto.com ja kohalikule meditsiiniseadmetega tegelevale ametiasutusele.

Toode on biolagunev.

Pakendi suurus/Tootekood

Müügiühik	Tootekood	GTIN	GTIN (müügiühik)
6 x 750 ml	8222	6417964082227	6417964482959



Lisateave

Kontrollige väljatrüki kehtivust meie kodulehelt www.kiilto.ee või saatke e-kiri info.kiiltoclean.ee@kiilto.com.